



Dimensions

Unité: mm
Tolérance des dimensions: ±10%

■ Version sur unit (D200)

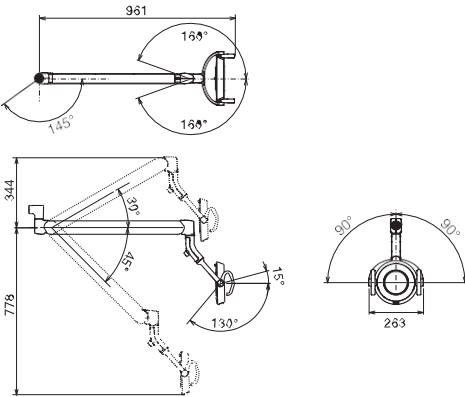


■ Version plafond (D212)

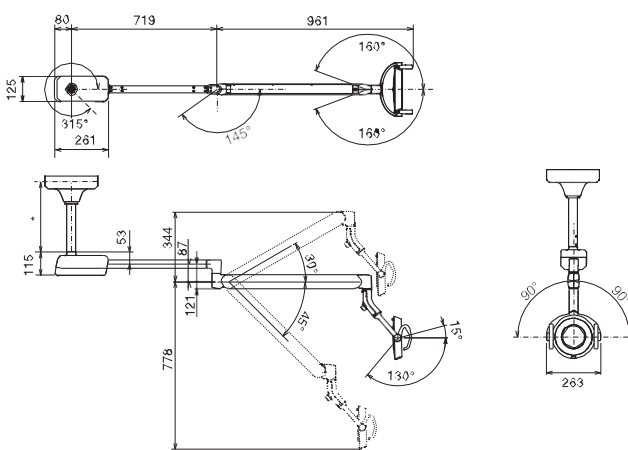


*Choisir la longueur de la colonne en fonction de la hauteur sous plafond

■ Version sur colonne (D201)

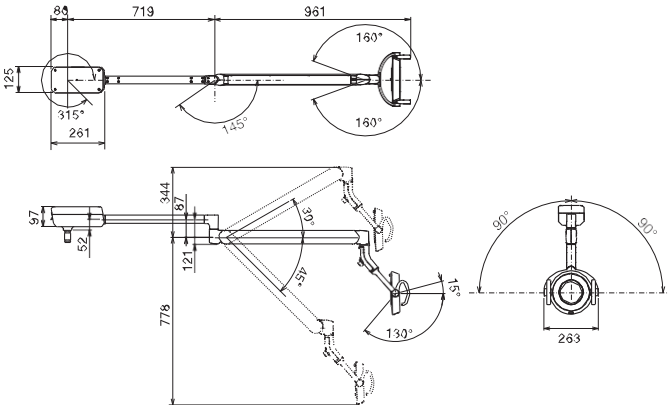

*(Non disponible à la vente en France)

■ Version montée au plafond sur rail (D205)

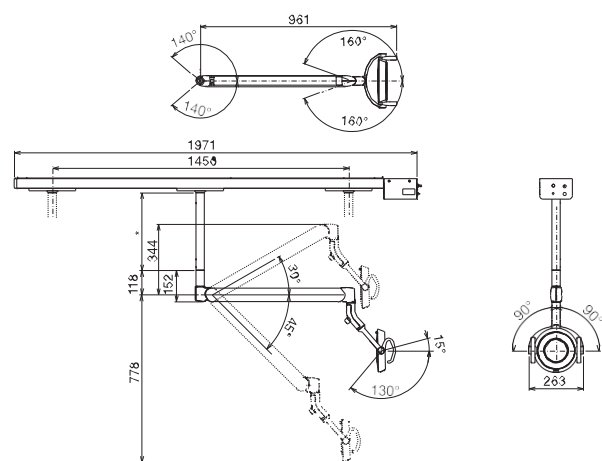

*Choisir la longueur de la colonne en fonction de la hauteur sous plafond

*(Non disponible à la vente en France)



SCIALYTIQUE SERIE
AL-D200/201/205/212



Site web: <https://www.belmont.fr>



Noms des produits: AL-D200
AL-D201
AL-D212
AL-D205



ÉCLAIREZ BRILLAMMENT

Le nouveau scialytique dentaire AL-D200 fournit une intensité variable jusqu'à 39,000 lux avec un champ lumineux rectangulaire et est suffisamment lumineux pour s'adapter aux soins dentaires les plus récents. Il est facile à allumer et à éteindre grâce à sa cellule sans contact et un mode composite peut également être activé.




Mode Traitement

Centre de la zone éclairée: 5,500-39,000 lx
Température de couleur corrélée: 5,000 K



Mode Composite

(Conforme à ISO 9680: 2014 5.2.10)
Centre de la zone éclairée: 7500 lx
Température de couleur corrélée: 2800 K

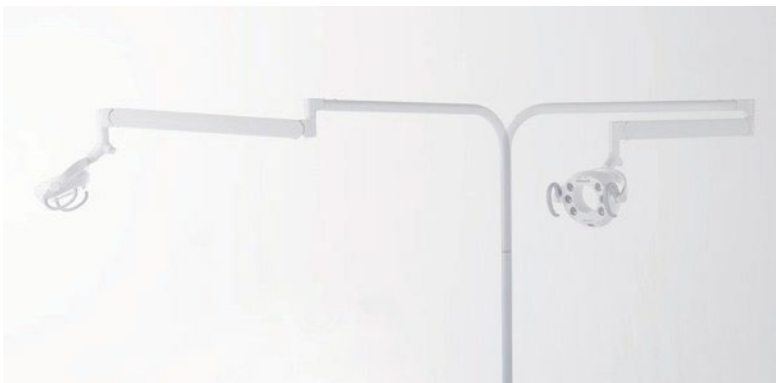

Éclairage Flexible

Le bras compensé Belmont permet au dentiste et à son assistante de déplacer et de positionner facilement le scialytique là où il/elle le souhaite pour faciliter les soins.



Pièces Amovibles

Afin de faciliter le nettoyage, les poignées amovibles et autoclavables peuvent être retirées sans effort par une simple pression sur une gâchette.

Types de montage



Monté sur unit



Monté sur colonne



Monté au plafond



Monté au plafond sur rail

Caractéristiques techniques

Tension nominale.....AC100-240V 50/60 Hz (Sur unit: DC 25V)
Courant d'entrée de ligne.....0.30-0.15A (Sur unit: 0.55A)
*Le courant d'entrée dépend du type de montage
Mode de fonctionnement.....Fonctionnement continu
Source d'éclairage.....10 modules LED
Distance d'éclairage.....Distance d'éclairage standard: 650mm
■ En mode Traitement (8 LEDs)
Centre de la zone éclairée: 5,500-39,000 lx
Température de couleur corrélée: 5,000 K
■ En mode Composite (2 LEDs)
(Conforme à ISO 9680: 2014 5.2.10)
Centre de la zone éclairée: 7,500 lx
Température de couleur corrélée: 2,800 K
Champ éclairé.....Dimensions du champ (longueur x largeur): 100 x 170mm
Index de rendu couleur.....Plus de 90

Options



Miroir pour le patient