


EURUS Maintenance, Nettoyage et Désinfection

Après chaque patient




1) Désinfection de l'unit du fauteuil et du scyalitique (Sauf lentilles du scyalique).

1. Humidifier un chiffon doux du FD366 fabriqué par Dürr Dental.
2. Essuyer l'équipement avec ce chiffon.

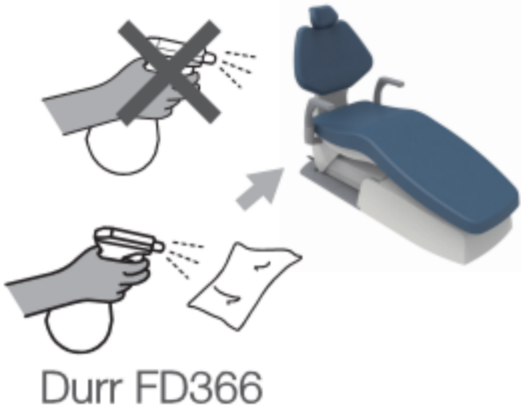

Durr FD366



⚠ ATTENTION
Ne pas pulvériser directement !

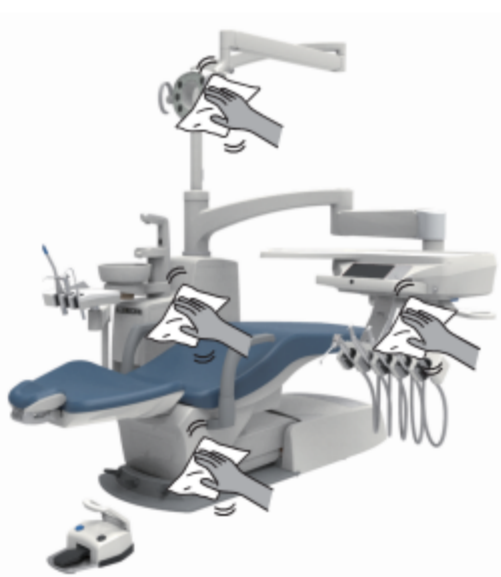

3. Utiliser un chiffon doux et sec et essuyer l'équipement avec jusqu'à ce qu'il soit sec.

Quotidiennement

1) Démontage et lavage des pièces marquées d'un " * "

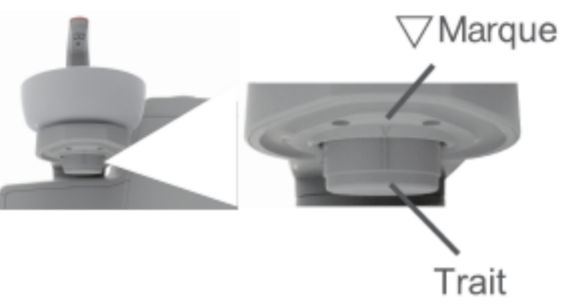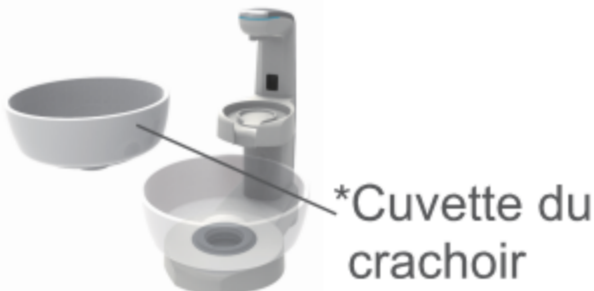

Remontage
Pour remonter le siphon, aligner le trait à la Marque ∇.




Pièce à main d'aspiration & Pompe à salive.



1. Laver les surfaces externes.



2. Laver l'intérieur et les parties mobiles.

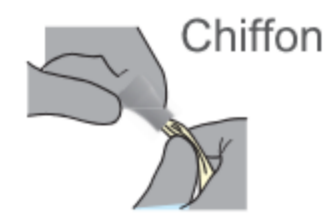

3. Laver les parties inaccessibles à l'aide d'une brosse.




4. Autoclaver



2) Rinçage instruments et jet de verre.

1. Appuyer sur la touche Fonction.
2. Insérer les instruments.

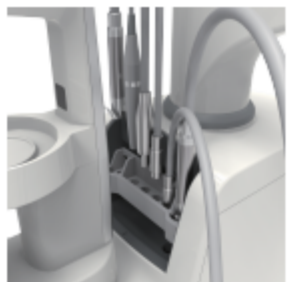


3. Appuyer sur "Rinçage"




3) Nettoyage des lignes aspiration et pompe à salive

Aspirer l'équivalent d'un gobelet d'eau (100ml d'eau ou plus).

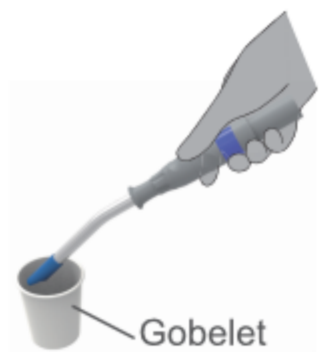


Gobelet

4) Nettoyage du filtre à déchets.
Rincer les éléments du filtre à l'eau courante

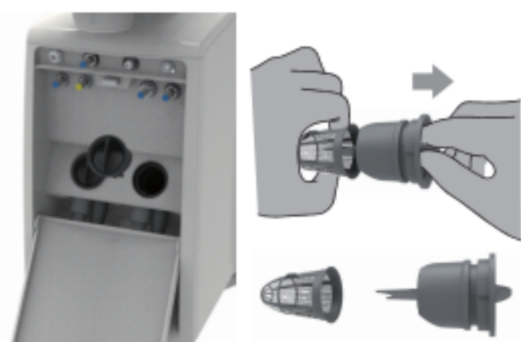

Rainure Ergot

Remontage
Aligner la rainure avec l'ergot

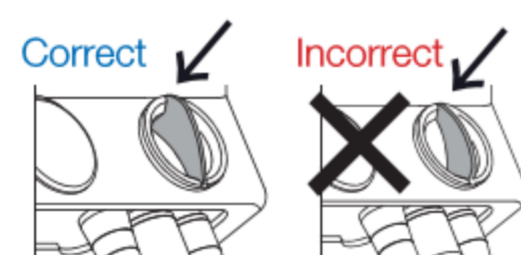


Position correcte:
La partie élargie du capuchon doit être positionnée vers le haut.

2) Nettoyage ligne aspiration & pompe à salive

Utiliser de l'Orotol Plus, fabriqué par Dürr Dental

⚠ ATTENTION
Ne pas utiliser d'autres produits chimiques

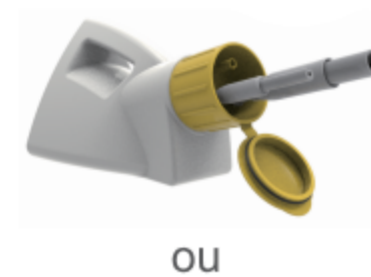

ou

