


# EURUS Maintenance, Nettoyage et Désinfection

## Après chaque patient



1) Désinfection de l'unit du fauteuil et du scyalitique (Sauf lentilles du scyalique).

1. Humidifier un chiffon doux du FD366 fabriqué par Dürr Dental.
2. Essuyer l'équipement avec ce chiffon.

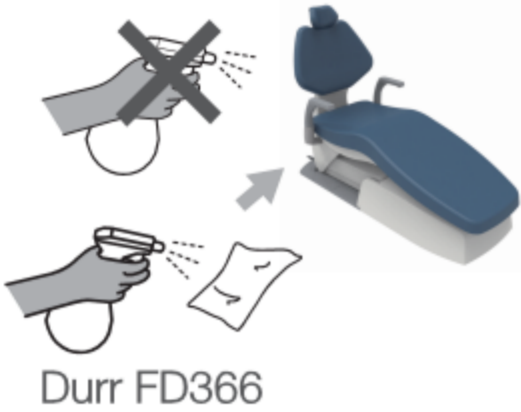

Durr FD366



**⚠ ATTENTION**  
Ne pas pulvériser directement !



3. Utiliser un chiffon doux et sec et essuyer l'équipement avec jusqu'à ce qu'il soit sec.

## Quotidiennement

1) Démontage et lavage des pièces marquées d'un " \* "

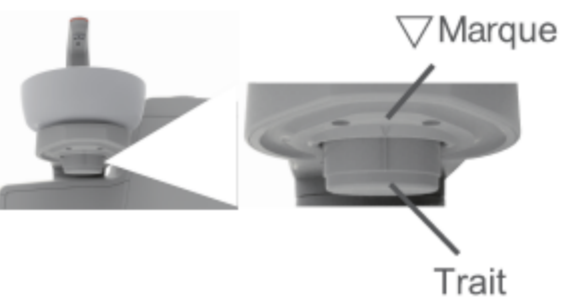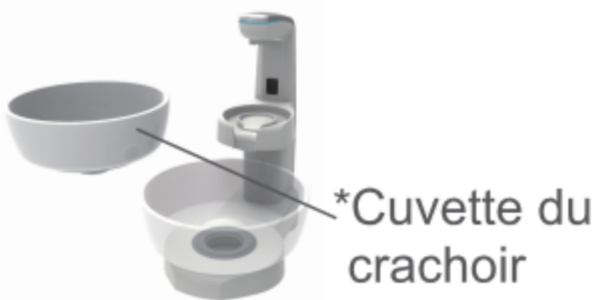

Remontage  
Pour remonter le siphon, aligner le trait à la Marque ∇.




Pièce à main d'aspiration & Pompe à salive.



1. Laver les surfaces externes.



2. Laver l'intérieur et les parties mobiles.

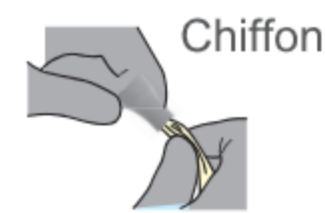

3. Laver les parties inaccessibles à l'aide d'une brosse.



4. Autoclaver



2) Rinçage instruments et jet de verre.


1. Appuyer sur la touche Fonction.



2. Insérer les instruments.




3. Appuyer sur "Rinçage"

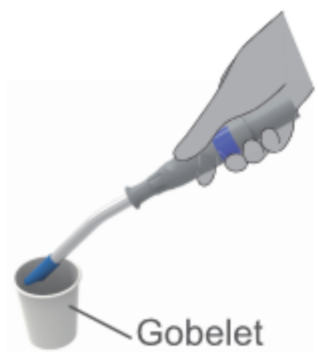

3) Nettoyage des lignes aspiration et pompe à salive

Aspirer l'équivalent d'un gobelet d'eau (100ml d'eau ou plus).

Gobelet

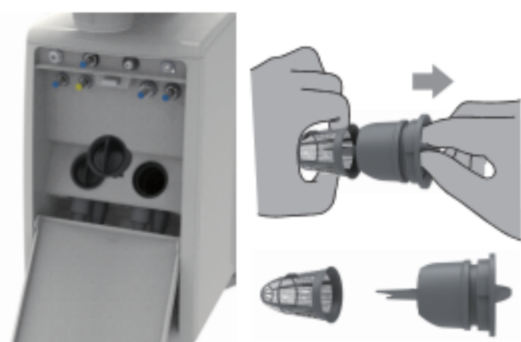


4) Nettoyage du filtre à déchets. Rincer les éléments du filtre à l'eau courante

Rainure Ergot



Remontage  
Aligner la rainure avec l'ergot

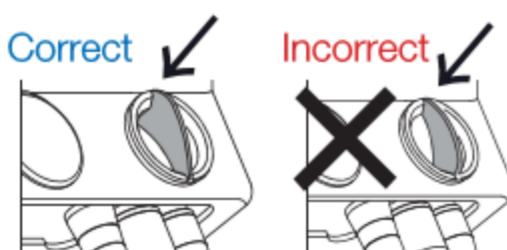

Position correcte:  
La partie élargie du capuchon doit être positionnée vers le haut.



2) Nettoyage ligne aspiration & pompe à salive

Utiliser de l'Orotol Plus, fabriqué par Dürr Dental



**⚠ ATTENTION**  
Ne pas utiliser d'autres produits chimiques

ou



# EURUS Maintenance, Nettoyage et Désinfection

## Hebdomadaire

Chiffon doux & sec




1) Nettoyage de l'unit, du fauteuil, et du scyalitique (Sauf lentilles du scyalitique).

1. Essuyer avec un chiffon doux et sec.

\* Si les surfaces externes de l'équipement sont très sales, suivre la procédure ci-dessous.



1. Humidifier un chiffon doux avec de l'eau contenant environ 10% de détergent naturel, puis passer ce chiffon humide sur l'équipement.

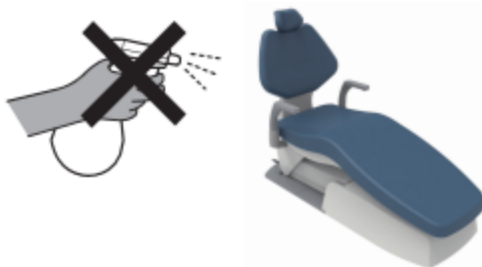

**ATTENTION**  
Ne pas pulvériser directement !



2. Humidifier un chiffon doux avec de l'eau, puis passer ce chiffon humide sur l'équipement.



3. Essuyer l'équipement avec un chiffon doux et sec.

Chiffon doux & sec



2) Nettoyage des lentilles du scyalitique  
Enlever le cache avant du scyalitique.

1. Pousser le levier de verrouillage vers la droite



2. Incliner le cache avant vers vous

3. tirez-le vers le haut pour l'enlever.

## Hebdomadaire



4. Essuyer en douceur les lentilles à l'aide d'un chiffon doux et sec ou retirez les poussières à l'aide d'une bombe d'air comprimé

Chiffon doux et sec

ou



Air comprimé

**ATTENTION**

Ne pas mettre de FD366 sur les lentilles du scyalitique.

Remontage du cache avant



5. Insérer les ergots du cache avant dans le chassis du scyalitique



6. Pousser le levier de verrouillage vers la droite et maintenez le dans cette position.



7. Rabattre le haut du cache avant contre la tête du scyalitique puis relacher le levier de verrouillage.

## Mensuel

1) Eliminer les résidus d'huile du séparateur d'huile

Lorsque le niveau d'huile atteint le trait sur le réservoir, remplacer le réservoir.



Eponge



Si l'éponge absorbante (consommable) est trop sale ou est saturée en huile, la remplacer

Trait