

GARDEZ VOTRE UNIT PROPRE & SAIN


Belmont propose des solutions contre les infections pour garantir une hygiène et une sécurité optimales pendant les soins.

Risques autour de l'unit.

Lignes d'irrigation: Bactéries

Des bactéries se forment sur les parois des canalisations d'eau à l'intérieur du cabinet dentaire en quelques jours seulement.

La légionellose est l'un des risques sanitaires courants liés aux soins dentaires.

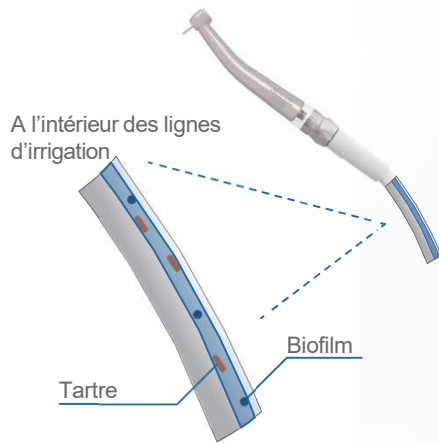

Rinçage


Nettoyage des lignes d'irrigation

Fréquence : Quotidienne



Metasys Green & Clean WK (Système WEK)

Système de décontamination de l'eau
WEK approved by DVGW
Fréquence : constamment

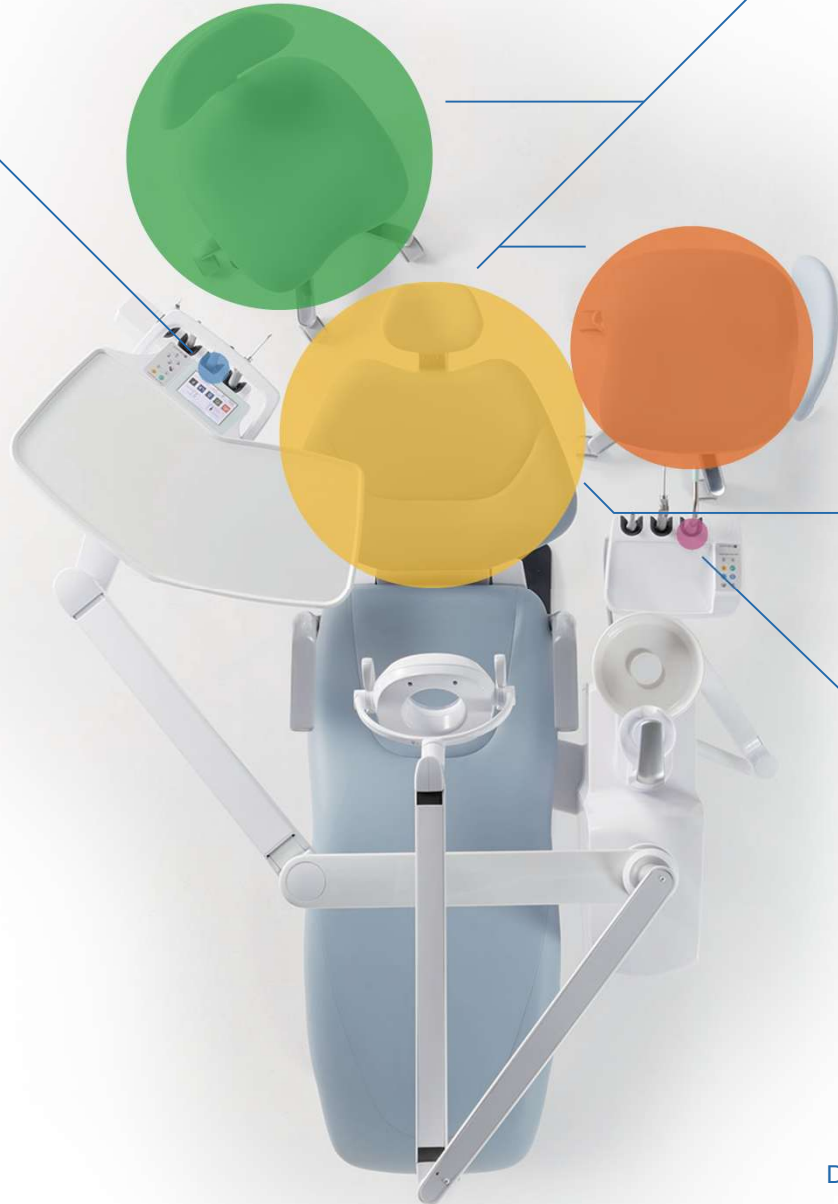

Surface de l'unit et du fauteuil : Virus

Au contact direct du sang et de la salive ou par aérosol provenant du patient, les virus se déposent sur les surfaces du fauteuil et de l'unit.



Zone à haut risque

- Praticien : Instruments, poignées unit/ éclairage, repose-nuque siège op.
- Assistante : Instruments, support assistante, poignée éclairage, siège op.
- Patient :



Dür FD366
Désinfection surfaces
Fréquence : après chaque patient.



Dür FD360
Nettoyage simili-cuir
Fréquence: après chaque patient.



Autoclave
Désinfection
Fréquence : après chaque patient.

Aérosol: Virus

Porter des lunettes et se tenir à distance du patient.



Lignes d'aspiration de l'unit: Virus

Le sang, la salive et les dépôts aspirés s'incrustent sur les parois des lignes d'aspiration et favorisent la prolifération de microbes.
Sans traitement, risque de prolifération de virus y compris HBV, HCV & HIV.



Dür Orotol plus Désinfection des lignes d'aspiration
Fréquence : Quotidienne

* La disponibilité peut varier selon le modèle et leurs caractéristiques..

SOLUTION EURUS



Commandes sans contact
Réduisez les risques d'infection en contrôlant l'équipement sans les mains.



Autoclave
Pièces détachables et autoclavables après les soins



Jetable
L'écran tactile et les touches actionnés par les opérateurs peuvent être recouverts d'un film barrière.



Nettoyage
Maintenez la surface et l'intérieur de l'équipement propres avec les produits désinfectants indiqué ci-dessous..



Dür FD366
Désinfection des surfaces




Dür FD360
Nettoyage du simili-cuir



Dür Orotol plus
Désinfection des lignes d'irrigation



Metasys Green & Clean WK(Système WEK)
Système de décontamination de l'eau Le WEK est conforme à la norme DVGW

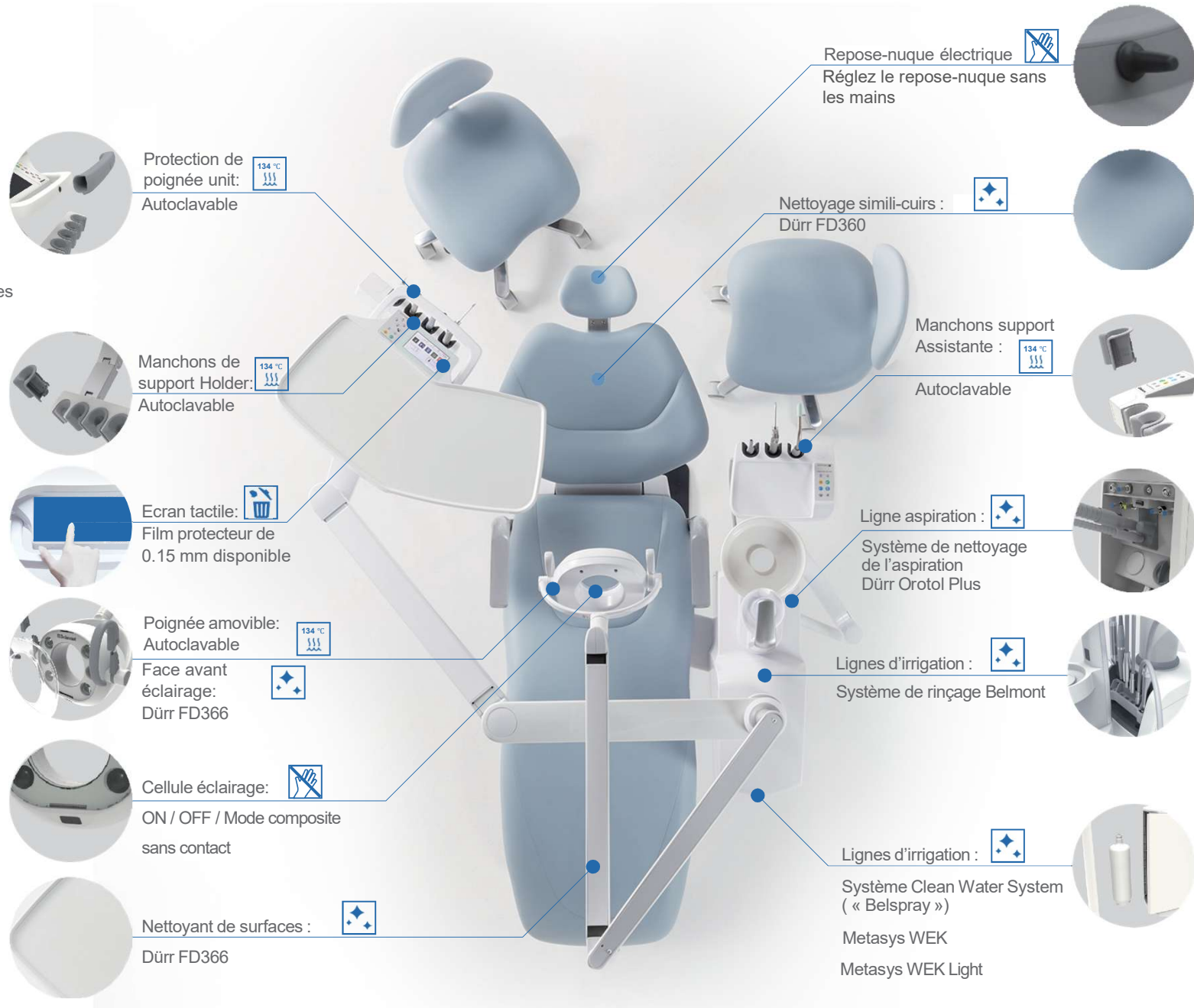

* La disponibilité peut varier selon le modèle et leurs caractéristiques.